

Forspiro®

Bedienungsanleitung



Öffnen

- Nehmen Sie den Inhalator in die linke Hand.
- Öffnen Sie die Schutzkappe mit der rechten Hand.




Spannen

- Durch seitliches Wegklappen des weißen Hebels mit der rechten Hand den Inhalator spannen, bis ein Klicken zu hören ist.
- Anschließend den weißen Hebel in die Ausgangsposition zurückklappen, bis dieser hörbar einrastet.



Inhalieren

- Langsam und entspannt ausatmen, nicht in den Inhalator.
- Mundstück mit den Lippen fest umschließen und gleichmäßig und tief einatmen.
- Danach Mundstück aus dem Mund nehmen und den Atem für etwa 5 – 10 Sekunden anhalten.
- Langsam ausatmen, jedoch nicht in den Inhalator.
- Schutzkappe schließen.
- Mund mit Wasser ausspülen und dieses ausspucken.

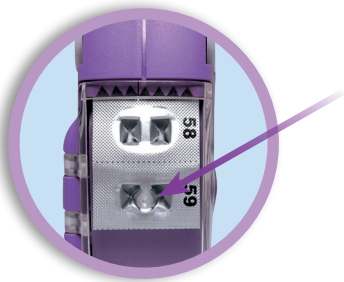

Sichtkontrolle durch transparentes Seitenfach*

- Pulverreste im Seitenfach sind ein Hinweis auf eine fehlerhafte Inhalation.*
- Durch das Abtrennen der Blisterstreifen am Ende eines Tages kann kontrolliert werden, ob die verordnete Anzahl an Inhalationen eingenommen wurde.*

* Nach fünf inhalierten Dosen erscheinen die leeren Blister im Seitenfach und können auf mögliche Pulverrückstände kontrolliert werden.

